





Comment mettre mon masque Résilience ?



Je me lave les mains pendant 20 secondes avec de l'eau et du savon.

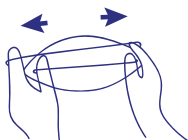

Je prends le masque par les élastiques.

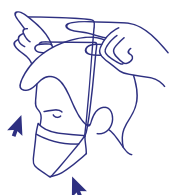

Je place le masque sous le menton jusqu'en haut du nez. Le masque doit bien adhérer au visage.



Je place les élastiques derrière la tête. Je place l'élastique du bas.




Je place l'élastique du haut.



Je ne touche plus mon masque quand il est placé.



Je porte un masque 4 heures maximum.

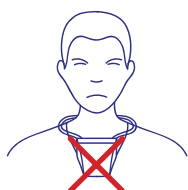


Je ne mets pas mon masque autour du cou.

Comment enlever mon masque Résilience ?



Je me lave les mains pendant 20 secondes avec de l'eau et du savon.

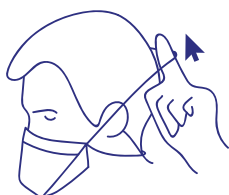

J'enlève mon masque par les élastiques.



Je le dépose dans un sac spécial avec les autres masques à laver.




Je me relave les mains pendant 20 secondes avec de l'eau et du savon.

Le masque ne remplace pas les gestes barrières.
Se laver régulièrement les mains.
Tousser ou éternuer dans son coude.
Utiliser un mouchoir en papier.
Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades.




Comment laver mon masque Résilience ?

Je peux le laver 20 fois

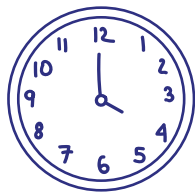


Je porte un masque 4 heures maximum.

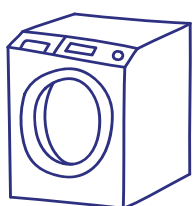

Je mets mes masques dans la machine à laver.
Température maximum de 60°.
Je peux les mettre avec le reste du linge.



Les masques doivent être séchés dans les 2 heures après le lavage.

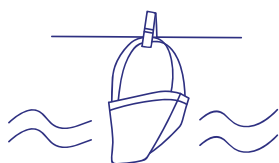

Le masque sèche en 15 minutes à l'air libre sur un endroit propre ou une corde à linge ou au sèche-linge.



Je peux repasser mon masque à 110° Maximum.

Le masque ne remplace pas les gestes barrières.
Se laver régulièrement les mains.
Tousser ou éternuer dans son coude.
Utiliser un mouchoir en papier.
Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades.